

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LESIONES LEVES PROVOCADAS POR SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA

(mascarilla nasal, oronasal y facial)

ANTES DE LA COLOCACIÓN

- 1 - Realizar una limpieza adecuada
- 2 - **Aplicar MEPENTOL® LECHE en todas las zonas de riesgo donde la mascarilla y sus sujeciones ejercen presión** (esperar a que se absorba)
- 3 - Aplicar el apósito protector y la mascarilla

MODO DE EMPLEO

Aplicar **MEPENTOL® LECHE** sobre zonas de riesgo o lesión, extenderlo con la yema de los dedos hasta su total absorción



DESPUÉS DE LA RETIRADA

- 1 - Retirar la mascarilla y el apósito protector
- 2 - Realizar una limpieza adecuada
- 3 - **Aplicar MEPENTOL® LECHE en todas las zonas de riesgo donde la mascarilla y sus sujeciones ejercen presión**

CARACTERÍSTICAS

- Alta tolerancia
- No irritante
- Rápida absorción
- Compatible con apósitos

**MEPENTOL®
LECHE**

Prevención y Tratamiento de Úlceras de la Extremidad Inferior en estadios iniciales
Prevención y Tratamiento de Úlceras por Presión de categoría I y II

CON EL AVAL DE:



ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS (Únicos con Marca CE Clase IIb)

- **Aportan un grado óptimo de hidratación a la piel**, evitando la sequedad cutánea y restaurando el film hidrolipídico
- **Favorecen la renovación de las células epidérmicas**, mejorando la función barrera de la piel y facilitando la cicatrización
- **Mejoran la microcirculación sanguínea**, mejorando las lesiones cutáneas relacionadas con la isquemia

ALFASIGMA 